


Dudent® Danylen är ett säkert system för att undvika stickskador

Uppfyller de senaste EU-direktiven samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter
om integrerad säkerhetsfunktion.

Tillverkat i Sverige.

INNAN INJEKTION

Sätt ihop Danylhylsans båda delar. Klick!

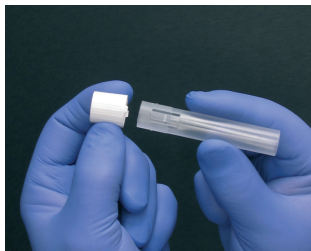

Obs! Danylhylsan är för engångs-
bruk, ska kastas efter användning.




Danylhylsans
vita del.
Vikt 1 g.



Danylhylsans
rör. Vikt 2 g.



Sätt i ampullen

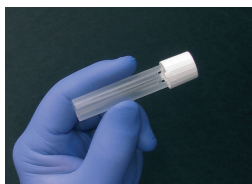

Trä på Danylhylsan på sprutan



Skruva på kanylen,
klart att använda

För instruktioner efter injektion,
se sid 2.


Dudent[®]
INREDNINGAR FÖR MEDICINSKA KRAV

EFTER INJEKTION

Skjut fram Danylhylsan över kanylen med tummen. Klick!



Obs! Enhandsfattning

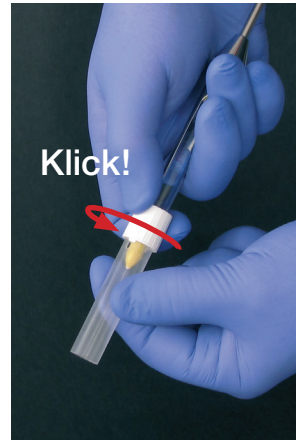

Vrid Danylhylsans överdel åt höger. Klick!



Ta bort ampullen



Stoppa ner sprutan i kanyltagaren och avlägsna kanylen med en knyck



Kasta!

Se gärna våra
instruktionsfilmer på
www.dandent.se

Dandent[®]
INREDNINGAR FÖR MEDICINSKA KRAV