

Tänk dig

vispgrädde...



...och inse sedan

att det är

JET BLUE BITE

Bettregistreringsmaterial

- Appliceras exakt där du vill ha det
- Inget bitmotstånd och ingen svikt
- Stenhård för stabilitet och flexibel för enkel justering
- Välj den hastighet som passar dig
 - **Fast** - 30 sekunders arbetstid
40 sekunders oral stelningstid
 - **Superfast** - 20 sekunders arbetstid
30 sekunders oral stelningstid



Exceptionell hantering med stabil och snabb härdning

JET BLUE BITE fast/superfast bettregistreringsmaterial flyter med en mjuk vispgräddeliknande konsistens till exakt den plats där du vill ha det i förutsägbar mängd och idealisk bredd. Det härdar snabbt oralt och blir

stenhårt för bättre stabilitet men ändå så flexibelt att det lätt kan trimmas och skäras. De överlägsna hanteringsegenskaperna är nyckeln till perfekt ocklusal passform vid första försöket.

Direkt applicering av JET BLUE BITE fast



Applicering av JET BLUE BITE fast



Direkt applicering med den unika spetsen Spreader Tip



Idealisk arbetstid



Bettregistrering



Slutlig bettregistrering



Lätt att skära



Lätt att trimma



Viktiga och praktiska tillbehör: Unik spridarspets för förutsägbar jämn bredd och tjocklek på applicerat material

Prova JET BLUE BITE i 25ml microSystem™. 38 % mindre spill i blandningsspetsarna!



JET BLUE BITE	Arbetstid	Oral härdningstid	Slutlig hårdhet	Dimensionsstabilitet i %
JET BLUE BITE fast	max. 30 s	min. 40 s	89 Shore A	-0,08%
JET BLUE BITE superfast	max. 20 s	min. 30 s	89 Shore A	-0,12%

Interna mätningar

JET BLUE BITE fast microSystem™ Single Pack	6492
Ampuller	2 x 25 ml
MT/CLEAR/CLEAR/WHITE/70/S	10 st.
Spridarspetsar	10 st.
JET BLUE BITE fast microSystem™ Refill	6496
Ampuller	8 x 25 ml
MT/CLEAR/CLEAR/WHITE/70/S	20 st.
Spridarspetsar	20 st.
JET BLUE BITE fast 50 ml Single Pack	6491
Ampuller	1 x 50 ml
MT/PINK/CLEAR/WHITE/84/S	6 st.
Spridarspetsar	6 st.
JET BLUE BITE fast 50 ml Refill	6495
Ampuller	4 x 50 ml
MT/PINK/CLEAR/WHITE/84/S	12 st.
Spridarspetsar	12 st.

JET BLUE BITE superfast microSystem™ Single Pack	6494
Ampuller	2 x 25 ml
MT/CLEAR/CLEAR/WHITE/70/S	10 st.
Spridarspetsar	10 st.
JET BLUE BITE superfast microSystem™ Refill	6498
Ampuller	8 x 25 ml
MT/CLEAR/CLEAR/WHITE/70/S	20 st.
Spridarspetsar	20 st.
JET BLUE BITE superfast 50 ml Single Pack	6493
Ampuller	1 x 50 ml
MT/PINK/CLEAR/WHITE/84/S	6 st.
Spridarspetsar	6 st.
JET BLUE BITE superfast 50 ml Refill	6497
Ampuller	4 x 50 ml
MT/PINK/CLEAR/WHITE/84/S	12 st.
Spridarspetsar	12 st.

JET BLUE BITE Zubehör		
microSystem™		
MT/CLEAR/CLEAR/WHITE/70/S	40 st.	6214
MT/CLEAR/CLEAR/WHITE/70/S	100 st.	6215
Spridarspetsar	100 st.	6223
microSystem™ Dispenser MK II	1 st.	6270

JET BLUE BITE tillbehör		
50 ml system		
MT/PINK/CLEAR/WHITE/84/S	40 st.	6551
Spridarspetsar	100 st.	6223
Dispenserare 50/75	1 st.	6900

* MT = Blandningsspetsar
S = rak

www.coltenewhaledent.com
© 2006 Coltène/Whaledent AG

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 53 00
Fax +41 (0)71 757 53 01
office@coltenewhaledent.ch

Coltène/Whaledent AG
Ängbyplan 69
Se-168 56 Bromma, Sverige
Tel: +46 (0)8 687 47 40
Fax: +46 (0)8 687 47 45
info@coltenewhaledent.se

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
productinfo@coltenewhaledent.com

coltène
whaledent