


3M ESPE

Dualhärdande bonding

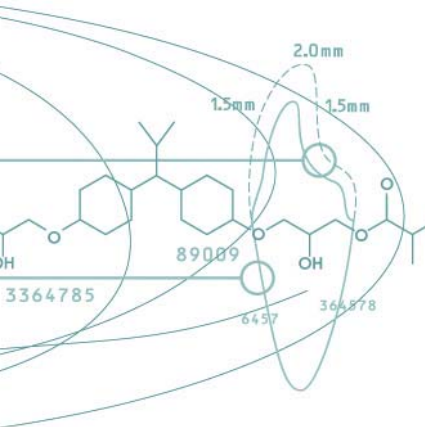

Adper™

Scotchbond™ Multi-Purpose


Adper™ Scotchbond™ Multi-Purpose

Adhesivsystem för direkta kompositfyllningar

- Bestående hög bindningsstyrka till dentin, oberoende av låg eller hög luftfuktighet i munhålan
- Snabbt system, spar tid
- Genom tillsats av aktivator och katalysator blir systemet dualhärdande
- Enkelt att använda till alla indikationer, ej teknikkänsligt, ger utmärkta resultat

Direkta och indirekta restaureringar på olika ytor

Ett komplett adhesivsystem för bindning till olika material med utmärkt bindningsstyrka, enkelt att använda, tidsbesparande och säkert.

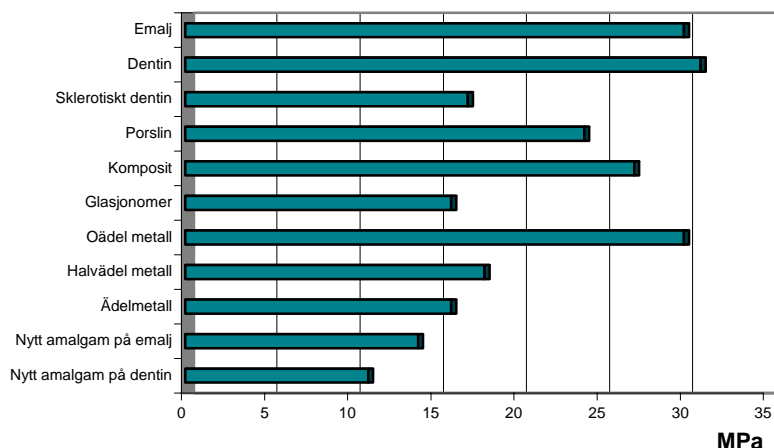

Scotchbond Multi-Purpose Adhesiv system - bindning till olika material

Direkt Kompositfyllning	Bindning av amalgam eller kemiskt härdande komposit	Indirekt bindningsteknik vid prefabricerade arbeten
<p>Applicera Scotchbond etsmedel på emalj och dentin – vänta 15 sekunder och spola. Blåstra försiktigt i 5 sekunder eller torka bort synlig fukt. Ytan skall vara fuktig.</p> <p>↓</p> <p>Applicera Primer på emalj och dentin. Blåstra försiktigt i 5 sekunder.</p> <p>↓</p> <p>Applicera Adhesiv på emalj och dentin. Ljushärda 10 sekunder.</p> <p>↓</p> <p>Inserera ljushärdande komposit.</p>	<p>Applicera Scotchbond etsmedel på emalj och dentin – vänta 15 sekunder och spola. Blåstra försiktigt i 5 sekunder eller torka bort synlig fukt. Ytan skall vara fuktig. Lägg matris.</p> <p>↓</p> <p>Applicera Aktivator på emalj och dentin. Blåstra försiktigt i 5 sekunder.</p> <p>↓</p> <p>Applicera Primer på emalj och dentin. Blåstra försiktigt i 5 sekunder.</p> <p>↓</p> <p>Blanda Adhesiv och katalysator 1:1 och applicera på emalj och dentin. Blanda amalgam eller kemiskt härdande komposit.</p> <p>↓</p> <p>Inserera amalgam eller kemiskt härdande komposit.</p>	<p>Applicera Scotchbond etsmedel på emalj och dentin – vänta 15 sekunder och spola. Blåstra försiktigt i 5 sekunder eller torka bort synlig fukt. Ytan skall vara fuktig.</p> <p>↓</p> <p>Applicera Aktivator på emalj och dentin. Blåstra försiktigt i 5 sekunder.</p> <p>↓</p> <p>Applicera Primer på emalj och dentin. Blåstra försiktigt i 5 sekunder.</p> <p>↓</p> <p>Applicera Katalysator på emalj och dentin.</p> <p>↓</p> <p>Cementera fast ersättningen. Vid bruk av dualhärdande cement bör alla cementskarvar ljushärdas. Stelningstid är beroende av valet av cement.</p>

Adhesivsystem för indirekta och direkta fyllningar:

- Snabbt
- Lätt
- Dualhärdande



Adper Scotchbond MP Plus fik bedömmelsen "Best of 2003 Preferred Products" at The Dental Advisor (Vol. 21, No. 1, January 2004)



Appl. på ersättningen

Applicera Katalysator på restaureringens bindningsyta.

Blanda och applicera kemiskt härdande eller dualhärdande cement på ersättningen

Beställningsinformation:

art nr	Beskrivning
7540S	Scotchbond Multi-Purpose Dental Adhesivsystem. 2 x 3ml Scotchbond fosforsyra etsmedel i spruta, 8ml Scotchbond Multi-Purpose Primer, 8ml Scotchbond Multi-Purpose Adhesiv, bruksanvisning, färgkodade penselskaft, engångspenslar, sprutspetsar, 3-håls blandningskopp.
7523	2 x 3ml Scotchbond fosforsyra etsmedel i spruta med 50 kanyler
7542	8ml Scotchbond Multi-Purpose Primer
7543	8ml Scotchbond Multi-Purpose Adhesiv
7546	4ml Scotchbond Multi-Purpose Plus Aktivator
7547	4ml Scotchbond Multi-Purpose Plus Katalysator

