

**SELECT HV ETCH***35% Phosphoric Acid Etchant***ALLMÄN INFORMATION**

BISCO:s nya **SELECT HV ETCH** är avsedd för selektiv, precis applikation. Detta etsmedel ger flytbarhet samtidigt som det är tillräckligt visköst för att förhindra oönskad utflytning. Selektiv etsning ger en djup fosforsyraetsning på emaljkanter under det att du bibehåller fördelarna med din själv-etsande adhesiv, såsom låg förekomst av postoperativ känslighet och fuktighetstolerans på dentin. De visuellt klara färgerna på denna nya produktkategori av etsmedel gör denna fosforsyra ideal för rutinmässig etsning där tydlig färgkontrast är viktig.

BISCO:s **SELECT HV ETCH** är fosforsyra ( $H_3PO_4$ ), avsedd att användas på emalj, dentin och som ett rengöringsmedel för restaurativa material. **SELECT HV ETCH** avlägsnar effektivt smear layer, etsar och demineraliserar emalj och dentin och skapar den nödvändiga yta med mikroretention som krävs för att åstadkomma ett bra bondingresultat. Etsmedlet spolats bort snabbt och lätt och lämnar en ren yta utan etsrester.

**Användningsområden:**

1. Etsning av dentin och emalj
2. Selektiv emaljetsning
3. Rengöringsmedel till dentala lagningsmaterial

**Avsedd användare:** Legitimerad tandläkare

**Varningar:**

- Fosforsyran i etsmedlet är kraftigt irriterande på ögon och hud. Skada kan uppstå om etsmedlet Tillåts kvarstanna på hud eller slemhinna under längre tid. Vid förekomst av kontakt med andra vävnader, spola omedelbart med rikligt med vatten i flera minuter.
- Om stänk i ögonen uppstår, spola med rikliga mängder med vatten och sök medicinsk hjälp omedelbart.

**Observanda:**

- Korskontamination: Produkten kan bestå av delar som är avsedda för engångs-användning. Släng använda eller kontaminerade spetsar. Rengör, desinficera eller återanvänd inte.
- Användning av vanligen förekommande hygieniska skyddshöljen för att undvika kontamination av sprutor under behandlingen rekommenderas. Om spruta kontaminerats släng denna. Rengör eller desinficera inte.

**Försiktighetsåtgärder:**

- Utsätt inte för direkt solljus. Utdragen solljusexponering kan orsaka missfärgning av etsmedlet; detta försämrar dock inte produktens funktion.
- Prova applicering av etsmedlet på ett blandningsblock eller på en glasplatta, FÖRE användning på patient för att bli bekant med det tryck som krävs för att pressa fram etsmedel ur spetsen. Använd aldrig intraoralt utan att först ha kontrollerat flödet från spetsen. Använd aldrig forcerat tryck på kolven för att få fram gel intraoralt; detta kan leda till att okontrollerad mängd av material kommer ut. Om man erfar ett flödesmotstånd, fortskrid INTE. Byt ut spetsen mot en ny spets och kontrollera flödet innan den används på patient.
- Putspastor som innehåller olja eller fluor bör inte användas eftersom dessa tillsatser kan påverka etsresultatet.
- Se individuell märkning av komponenter för särskilda utgångsdatum.
- Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- Säkerhetsdatablad finns på [bisco.com](http://bisco.com).

## SELECT HV 30ML JUMBOSPRUTA

- Montera refillsprutan på bulksprutan på korrekt sätt och kontrollera. Kopplingen måste vara låst i korrekt position innan material pressas fram.
- De två sprutorna får inte sättas samman med våld då detta kan leda till att respektive sprutas koppling går sönder.
- Tryck inte på kolven när bulksprutan är försluten eller har refill monterad eller är utan spets eller spruta.
  - a. Om försluten eller refill är monterad kan material komma ut kring kolven och fylla ut utrymmet mellan kolv och vägg på sprutan eller tryckas ut i sprutans bakände.
  - b. Om bulksprutan varken är försluten eller har någon refillspruta monterad, kan material spruta ut från sprutspetsen.
- Återförslut bulksprutan när den inte används för att förhindra att material torkar och lägg försiktigt tillbaka i lådan. Ställ inte ner sprutan hårt med spetsen riktad uppåt eftersom material kan tryckas fram.
- Överför inte material fram och tillbaka mellan bulkförpackning och refillspruta då detta kan ge upphov till luftfickor och eventuell korskontamination.

### **OBS:** Att hålla i åtanke med 30ml bulkspruta.


1. Material kan förekomma mellan kolv och vägg. Produkten är fortfarande användbar.
2. Om det noteras att material inte kan tryckas fram i refillsprutan, sätt fast refillsprutan på bulksprutan och dra försiktigt tillbaka för att suga ut luften från bulksprutan. Skruva av refillsprutan och släpp ut luft. Upprepa om så behövs tills materialet börjar tryckas in i refillsprutan.

### **OBS:** Att hålla i åtanke med refillsprutan.


1. Refillsprutans kolv kan lossna om den dras tillbaka för snabbt. Dra försiktigt i refillsprutans kolv för att trycka fram material.
2. Var noga med att skruva fast applikationsspetsen noggrant annars kan läckage och spill uppstå.
3. Enbart för en-gångsanvändning. Annars kan korskontamination uppstå. Släng efter användning.

1. Om **SELECT HV ETCH** 30ml jumbospruta används, gör som följer:

- a. Montera den etikettförsedda enhetsdossprutan (1.2ml) i bulksprutans öppning genom att vrida fast låsningsmekanismen ordentligt på bulksprutans gängor.

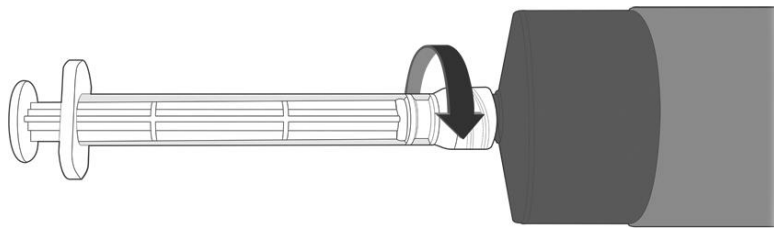

- b. När sammankopplingen är säker, dra kolven på 1.2ml sprutan bakåt långsamt för att fylla med önskvärd mängd material.

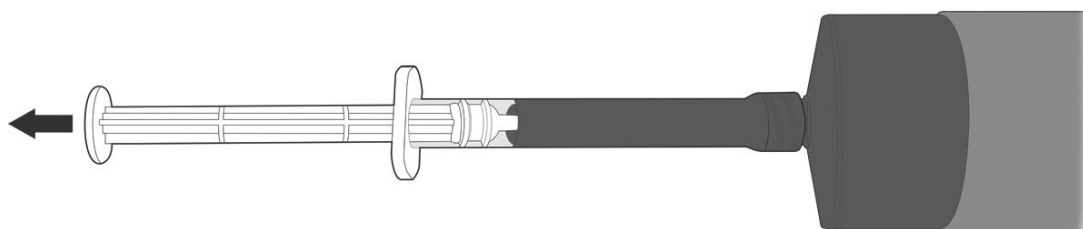

- c. Sätt tillbaka hättan på 30ml sprutan.
- d. Om laddad spruta inte används omedelbart, sätt tillbaka låshättan.
- e. Vid användning, avlägsna hättan och vrid fast den ljusblå 25 gaugespetsen. Dispensera som anvisat.

**1. Etsning av dentin och emalj**

**2. Selektiv emaljetsning**

1. Avlägsna den vita hättan från etssprutan.
2. Montera en ljusblå 25 gauge spets på 1,2ml-sprutan eller en mörkblå 22 gauge spets på 5g-Sprutan.
3. Kontrollera flödet av etsmedel före intraoral applicering. Lägg upp en mindre mängd gel på ett block eller på en gasväv för att bli bekant med viskositeten.
4. Om ytan som ska etsas inte är nypreparerad, rengör med pimpstensputs. Putspastor som innehåller olja eller fluor bör inte användas eftersom dessa tillsatser kan påverka etsningen. Spola noggrant.
5. Avgränsa arbetsfältet: Användning av kofferdam rekommenderas.
6. Tryck fram etsmedel direkt på ytan som ska etsas. Lämna etsmedel på plats i 15 sekunder.
7. Spola noggrant i 5 sekunder med sug. Om selektiv emaljetsning utförs, sug innan spolning görs för att undvika att etsmedel flyter ut på dentinet.
8. Fortskrid omedelbart med bondingförfarandet.
9. Släng alla en-gångskomponenter.

**2. Rengöringsmedel för dentala lagningsmaterial**

1. **SELECT HV ETCH** kan användas på lagningsmaterial för att på ett effektivt sätt avlägsna organiska föroreningar. Applicera etsmedel på ytan i 30 sekunder och spola noggrant med vatten.

**OBS:** Zirkonia-ytor som inte primerbehandlats ska INTE rengöras med fosforsyra. Använd ett rengöringsmedel för ersättningar såsom ZirClean för att ta bort föroreningar.

**HYGIEN**

Återförslut sprutor med "luer lock" skyddshätta. Användning av vanligen förekommande hygieniska skyddshöljen för att undvika kontamination av sprutor under behandling rekommenderas.

**AVFALLSHANTERING**

Se lokala föreskrifter angående hantering av avfall. I frånvaro av sådana se nationella eller regionala föreskrifter för avfallshantering.

**FÖRVARING**

Förvara vid rumstemperatur (20°C - 25°C). Förvara inte i direkt solljus.

**GARANTIER**

Bisco Inc. bekräftar skyldigheten att ersätta produkter som visats vara defekta. Bisco Inc. åtar sig inte ansvarskyldighet som hänförs till skador eller förluster, vare sig direkta eller indirekta till följd av användning eller felaktig användning av produkterna. Före användning åligger det användaren att bedöma lämpligheten att använda produkten för avsett ändamål. Användaren påtar sig därigenom all risk och ansvarskyldighet.

\* SELECT HV och ZirClean är registrerade varumärken som tillhör BISCO, Inc.

**Anmärkning:** Rapportera alla allvarliga händelser till BISCO och den behöriga myndigheten på platsen där användaren och/eller patienten befinner sig

BISCO INC.  
1100 W. Irving Park Rd  
Schaumburg, IL 60193  
1-800-247-3368  
1-847-534-6000  
[www.bisco.com](http://www.bisco.com)

HULTÉN & Co Dental  
Sandegårdsgatan 5  
S-21611 Limhamn  
040 – 15 66 77  
[mail@hulten.com](mailto:mail@hulten.com)  
[www.bisco.se](http://www.bisco.se)

CE ADMINISTRATOR  
BISICO France  
208 Allé de la Coudoulette  
13680 Lançon De Provence  
France  
Phone: 33-490-42-9292