

LMarte™



LM feel the difference



FORMGE MÄSTERVERK

LMArte™



ESTETISK SKIKTNING - MED LM-ARTE™ LYCKAS DET

LM-Arte™ är en uppsättning innovativa instrument för restaurering av tänder och har utformats speciellt för komposituppbyggnad genom skiktteknik. Varje tandinstrument är märkt med en färg och namngivet enligt sin funktion. På så vis blir det lätt för dig att genomföra enkla, funktionella och snabba behandlingar. De lätta och ergonomiska LM™-skaften och spetsarna som utformats av högkvalitativa material gör att instrumenten är lätthanterliga och hjälper dig att uppnå utmärkta behandlingsresultat.

SAMARBETE MED STYLEITALIANO™

Instrumentserien LM-Arte™ har utvecklats i samarbete med Styleitaliano™ - en grupp skickliga tandläkare som delar vår passion för utveckling av suverän tandvård.

Projektet Styleitaliano™ uppstod som en inspirerande idé hos två goda vänner – Walter Devoto and Angelo Putignano. Dessa berömda experter inom traditionell och estetisk tandvård lade märke till att det visserligen fanns gott om lämpligt material tillgängligt för att skapa snygga tandvårdsresultat, men att det också fanns en brist på bra instrument för att tillämpa materialen.



Styleitaliano™ är en växande grupp skickliga tandläkare som bidrar med nya idéer som förenklar och effektiviserar vardagliga tandvårdsrutiner. Via sociala medier når de idag ut till tusentals tandläkare med översiktliga bilder, instruktionsvideor, kurser, tal och föreläsningar. Läs mer om Styleitaliano™:s filosofi på www.styleitaliano.org och ta del i gruppens lyckade verksamhet!



Följ och prenumerera på
Styleitaliano™-gruppen
på Facebook och
på Instagram



LMArte™ Solo - TANDINSTRUMENTDUO FÖRENKLAR DINA RUTINER

NYHET!

VARFÖR?

Dessa tandinstrument är perfekta för att skapa smidiga tandläkarrutiner: med hjälp av endast två instrument kan du utföra de flesta avancerade restaureringarna både som före- och efterbehandling.

VAD?

LM-Arte™ Solo tandinstrument gör allt smidigare, från fyllnader till ergonomi och hygien då färre instrument behövs på instrumentbrickan. Effektivisera behandlingen med dessa två tandinstrument som är allt du behöver för direkta kompositrestaureringar av främre och bakre tänder.



Läs mer på följande sidor och besök LM™:s websida på
www.lm-dental.com/LM-Arte

STORT UTBUD AV TANDINSTRUMENT



LM-Arte™ Applicata

LMErgoSense® LM 46-49 ES
LMErgoMax™ LM 46-49 XSI



LM-Arte™ Applicata Twist

LMErgoSense® LM 464-494 ES
LMErgoMax™ LM 464-494 XSI



LM-Arte™ Modella

LMErgoSense® LM 442-443 ES
LMErgoMax™ LM 442-443 XSI



LM-Arte™ Condensa

LMErgoSense® LM 488-489 ES
LMErgoMax™ LM 488-489 XSI



LM-Arte™ Misura

LMErgoSense® LM 496-497 ES
LMErgoMax™ LM 496-497 XSI



LM-Arte™ Posterior Misura

LMErgoSense® LM 498-499 ES
LMErgoMax™ LM 498-499 XSI



LM-Arte™ Cusp Misura

LMErgoSense® LM 468-469 ES
LMErgoMax™ LM 468-469 XSI



LM-Arte™ Fissura

LMErgoSense® LM 481-487 ES
LMErgoMax™ LM 481-487 XSI



LM-Arte™ Eccesso

LMErgoSense® LM 307-308 ES
LMErgoMax™ LM 307-308 XSI



LM-Arte™ Solo Anterior

LMErgoSense® LM 431-433 ES
LMErgoMax™ LM 431-433 XSI



LM-Arte™ Solo Posterior

LMErgoSense® LM 434-438 ES
LMErgoMax™ LM 434-438 XSI

UTVALDA INSTRUMENTUPPSÄTTNINGAR FÖR DINA HÖGKVALITATIVA RESTAURERINGAR



LM-Arte™ Set

Komplett uppsättning till behandling av främre tänder i LM-Servo™ 5-kassetten, där det ingår

- LM-Arte™ Eccesso
- LM-Arte™ Misura
- LM-Arte™ Fissura
- LM-Arte™ Applicata
- LM-Arte™ Condensa

LMErgoSense® LM 6840 ES

LMErgoMax™ LM 6840 XSI



LM-Arte™ Posterior Set

Komplett uppsättning till behandling av bakre tänder i LM-Servo™ 5-kassetten, där det ingår

- LM-Arte™ Posterior Misura
- LM-Arte™ Cusp Misura
- LM-Arte™ Fissura
- LM-Arte™ Modella
- LM-Arte™ Condensa

LMErgoSense® LM 6844 ES

LMErgoMax™ LM 6844 XSI



LM-Arte™ Complete Set

Komplett instrumentkit till all slags behandlingar i LM-Servo™ 8-kassetten, där det ingår

- LM-Arte™ Eccesso
- LM-Arte™ Misura
- LM-Arte™ Applicata
- LM-Arte™ Posterior Misura
- LM-Arte™ Cusp Misura
- LM-Arte™ Fissura
- LM-Arte™ Modella
- LM-Arte™ Condensa

LMErgoSense® LM 6848 ES

LMErgoMax™ LM 6848 XSI

Olika skaft att välja bland

Alla LM-Arte™-instrument finns tillgängliga med två olika ergonomiska skaftvarianter:



LMErgoSense®

Större storlek och utformning ger suverän greppkapacitet med effektiva och bra ergonomiska resultat, vilket bevisats genom vetenskapliga, kliniska tester. (Ø 13,7 mm)

Skaftet finns tillgängligt med inbyggd LM DTS™ RFID-etikett, effektivt och praktiskt vid hantering och patientsäkerhet. Läs mer på www.dentaltracking.com.



LMErgoMax™

Denna klassiska ergonomiska utformning fungerar bra vid alla kliniska behandlingar och är bekväm att hålla i samt lätthanterlig. (Ø 11,5 mm)



NYHET!



INSTRUMENTET FÖR DIREKTA SKALFASADER LM-Arte™ Solo Anterior

Instrument för högkvalitativa estetiska restaurationer av framtänder. Runda och raka spatlar utformade att användas för komposituppbbyggnad på framtänder, särskilt mot läppar.

Vass spets

Modellering med precision
Mikromodellering
Gränsmarkeringar
Skrapning

Raka kanter

Skrapa

Platt profil

Utjämning
Uniform

Tunt blad

Modellering mellan tänder

Konvex profil

Modellering på ett enda ställe
Skapa djupa partier
Skapa buckal profil
Skapa cervical profil
Komma åt svåråtkomliga partier

Vinklad kant

Begrepp
Skrapa

Vassa kanter

Skära, dela mitt itu
och dela Sidvallar

Rundad spets

Känsliga gränsmarkeringar
Cervikala konturer



INSTRUMENTET FÖR BAKRE TÄNDER LM-Arte™ Solo Posterior

Instrument för högkvalitativa kompositrestaurationer av bakre tänder. Kompositinstrument utformat för att användas till bulkfyllning och uppbbyggnad av kompositmaterial. Med den vassa spetsen skapar du konturer på ocklusala ytor.

Platt profil

Avlägsnande av restöverskott
Avlägsna fyllningsöverskott

Vinkling

Åtkomst
vid djupa
håligheter

Platt instrumentspets

Kompositinstrument

Halvrunda kanter

Lutande modellering
Avlägsna fyllningsöverskott
Avlägsnande av plack

4-5 mm säkert parti för bulkfyllning


Test till bulk- och fyllnadsmaterial

Spetsig profil

Avlägsna fyllningsöverskott
Lutande formgivning
Sekundär anatomi


Vass spets

Modellering med precisionsförmåga
Mikromodellering
Gränsmarkeringar
Skrapning
Flödesspridning
Avlägsnande av bubblor

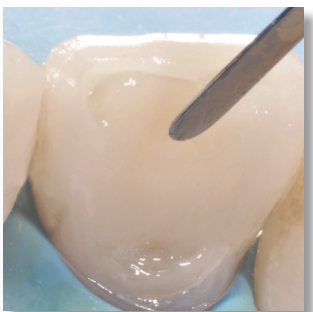

APPLICERA FLEXIBELT LM-Arte™ Applica

En mycket smal och flexibel spatel för hantering och estetisk modellering av komposit. Med den flexibla spetsen kan man varsamt formge kompositskikten så att de motsvarar tandens naturliga former. Appliceras tunna spets används vid modellering i trånga partier eller mot matrisbandet.

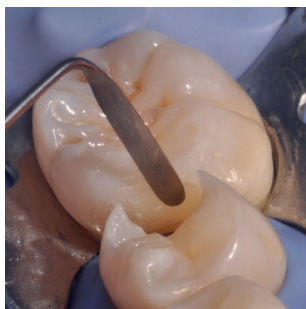

APPLICERA MED EN VRIDNING LM-Arte™ Applica Twist

En fin, flexibel och smal spatel för kompositmodellering. Med Applica Twist blir det mycket lätt att modellera i approximala utrymmen och marginala kanter i matrisen. Med de vinklade spetsarna kommer du åt mycket svåråtkomliga ytor, utan att arbetspositionen för handen onödigt försämras.



MODELLERA FLEXIBELT LM-Arte™ Modella


Extra fin, vid spatel för uppbyggnad av komposit. Passar särskilt bra till bredare tandtyper som munnpartier vid framtänderna. Den breda spatelspetsen används för att jämna ut kompositmaterialet. Den flexibla, varsamma och vassa spetsen gör att estetiska detaljer kan utformas med precision. Spateln fungerar utmärkt för att applicera komposit från en spruta.





TRYCK FÖRSIKTIGT LM-Arte™ Condensa

En lång och rundad stoppare, särskilt utformat för kompositmodellering. Instrumentets vinklade delar ger obegränsad åtkomst även vid svåråtkomliga håligheter. Condensa har både en tjock och en tunn spets som kan användas för olika stora håligheter både i främre och bakre partier. Den runda instrumentändan möjliggör en sammanpressning av kompositmaterial, helt utan risk för att fastna.

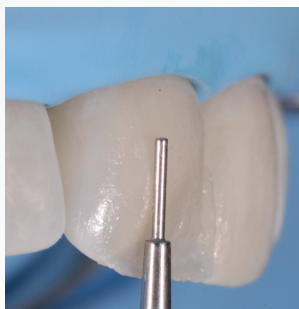

APPLICERA JÄMNT LM-Arte™ Misura

Ett enastående instrument för att applicera lager av kompositmaterial med perfekt tjocklek horisontalt och vertikalt vid restaurering av framtänder. Efter att skikten applicerats och innan polymerisering av dentinkompositen, placeras

den tunnare, cylinderformade spetsen på tandemaljen. På så vis modelleras försiktigt det återstående opolymeriserade kompositskiktet under den koniska spetsen och ett optimalt utrymme lämnas för emaljkompositskikt. Misura-instrumentets tjocka, korta ände placeras horisontalt på den preparerade kavitetens kanten så att spetsens ände ligger på den ursprungliga emaljen. Detta fastställer rätt mängd transparent komposit att applicera på översta skiktet. Estetisk restauration uppnås med en jämn balans mellan opak och genomskinlig komposit, vilket gör att grå effekter av kompositen undviks.





GÖR EN JÄMN Fyllning LM-Arte™ Posterior Misura

Posterior version av det populära Misura-instrumentet. Utformad för att kunna uppnå perfekt horisontell och vertikal tjocklek hos kompositskikten vid posteriora restaurationer. Instrumentets gaffelformade ände möjliggör modellering av den proximala väggen för att kopiera den angränsande tandens höjd och anatomi med närvaro av en matris.




NYHET!

UTVÄRDERA TYDLIGT LM-Arte™ Cusp Misura


Ett suveränt instrument för mätning av tandkuspens storlek och höjd vid utvärdering av behovet av tandkuspförberedelse för fixering och restauration. Passar perfekt vid utvärdering av den naturliga tandstrukturens resistenskraft och val av restaureringsteknik. Om spetsen på gaffelinstrumentet når hela vägen ner till spetsens märken är tandstrukturen för svag att stå emot okklusion vid direkt restaurering. Andra behandlingsalternativ måste övervägas.



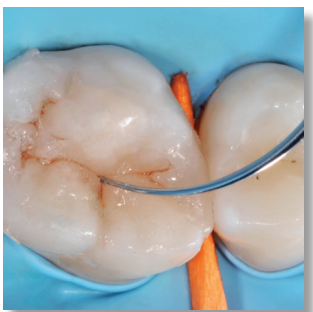


FORMGE MED PRECISION LM-Arte™ Fissura

Modelleringsinstrument med två extremt vassa spetsar. Den koniska spetsen är perfekt för att formge ocklusala ytor hos de bakre tänderna. Instrumentets smala, böjda spets är perfekt för att formge fissurer och mameloner samt för att belägga skikt av komposit eller sealer. Fissura-instrumentets flexibilitet gör det möjligt att varsamt kontrollera om det finns rester av bondingmaterial kvar på tandytorna.

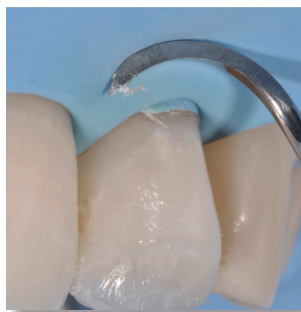

AVSLUTA SNYGGT LM-Arte™ Eccesso

Ett tandinstrument skapat för att avlägsna komposit- och bondingrester. De särskilt vinklade instrumentspetsarna på Eccesso lämpar sig utmärkt för att avlägsna överskott från cervikala främre ytor eller interproximala molarytor. Detta ypperliga och flexibla instrument kännetecknas av optimal längd, tjocklek och bredd på bladet.

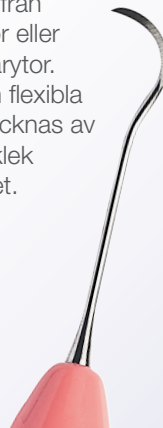

Besök Styleitaliano™ hemsidan på www.styleitaliano.org med information om behandlingsfall och restaureringar med LM™-instrument



KLARA AV UTMANINGEN MED TANDKÖTTRETRAKTION - LMGengiva™

Syftet med restaurerande behandling av en cervikalskada är att uppnå en perfekt försegling, stark bonding och utmärkt polering av kompositmaterialet. Mekanisk tandkötsretraktion vid cervikala restaureringar kan bli traumatisk om den inte görs ordentligt.

Instrumentet LM-Gengiva™ med tandkötsretraktorer används för att undvika att tandkötet skadas i onödan och för att uppnå bästa behandlingsresultat. Med hjälp av denna metod uppnås önskat slutresultat: mjukvävnaden skadas inte och estetiska krav kan uppfyllas.



LM-Gengiva™ Instrumentkit för tandkötsretraktion

LMErgoSense® LM 7556K ES

LMErgoMax™ LM 7556K XSI

Innehåller instrumentet LM-Gengiva™, blå tandkötsretraktorer (förpackning med ca 90 st, 30 st storlek) och LM-MultiLever™ för avlägsnandet av plastände



TANDKÖTTRETRAKTORER

- retraherar tandkötet från restaureringen
- den hårda plastspetsen medger en kraftig retraktion
- plastspetsarna ger viss flexibilitet för mer anpassning under tryck
- spetsen verkar som en tät försegling mellan tandkötet och tanden
- skyddar tandkötet och minskar sannolikheten för misslyckade fixeringar
- bondingytan och tandkötskanten syns tydligt; perfekt kontrast mot mjukvävnader
- kan anpassas med borrar för att passa konvex eller konkav tandrot
- spetsens yta fastnar inte på bondingmaterialet
- ingen interferens med polymeriseringen
- för engångsbruk.

LM Dental™

LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen | Finland

Tel. +358 2 4546 400

info@lm-dental.com | www.lm-dental.com

Var kan jag köpa detta?
Kontakta din lokala återförsäljare!