

## Avsedd användning

Guttaperkaspetsar i fast form för rotfyllning.

## Förberedelse före användning

1. Kontrollera produktens utgångsdatum före användning och förvissa dig om att det inte finns smuts, damm eller främmande ämnen på produkten. Använd inte guttaperkan om materialet är hårt eller sprött eller om det inte är elastiskt.
2. Läs tillverkarens instruktioner och steg för steg-anvisningar och förvissa dig om att du förstår innehållet.
3. Förbered nödvändiga tillbehör och instrument innan behandlingen påbörjas.

## Användarinstruktioner

Följ stegen nedan för att fylla rotkanalen.

1. Välj en guttaperkaspets som har rätt storlek i förhållande till apex och kontrollera arbetslängden innan rotkanalen fylls. Klipp vid behov bort överflödigt material från spetsen innan guttaperkan placeras i rotkanalen.
2. Ta en röntgenbild efter placering i rotkanalen för att kontrollera att guttaperkaspetsen är placerad en millimeter från apex och att materialet fyller kanalen ordentligt.
3. Avlägsna guttaperkaspetsen från rotkanalen och torrlägg med en papperspets. Välj en fil i en storlek mindre än den som använts för att preparera kanalen. (Även andra rotkanalinstrument kan användas.) Belägg filen med förseglingsmaterial och applicera materialet inuti kanalen. Avsluta genom att applicera förseglingsmaterial på guttaperkaspetsens nedre del, ca en millimeter, och placera guttaperkaspetsen i rotkanalen.
4. Ovanstående procedur är den mest grundläggande metoden. Men tandläkaren kan välja att använda flera guttaperkaspetsar och utföra proceduren på annat sätt beroende på patientens symptom.

- ◆ Guttaperkaspetsar är avsedda för engångsbruk. Får inte återanvändas.

## Förvaring efter användning

Förvara guttaperkaspetsar som blivit över efter behandlingen i någon form av behållare i rumstemperatur för att förhindra förorening.

## Hantering och förvaring

1. Förvaras i rumstemperatur. (2–27°)
2. Förvaras åtskilt från lättantändligt och brännbart material och från hög värme.
3. Hanteras varsamt. Undvik att kasta och tappa produkterna.
4. Förvaras åtskilt från produkter i andra storlekar och av andra typer.

## Försiktighetsåtgärder

- ◆ Allmänna försiktighetsåtgärder och varningar

  1. Produkten får endast användas av tandläkare. Följ anvisningarna noga.
  2. Använd inte produkten på patienter som är allergiska mot produkten.
  3. Produkten får endast avsedd för utvärtes bruk och måste förskrivas för att användas invärtes.
  4. Skydda patientens andningsorgan med kofferdam innan behandlingen påbörjas.
  5. Förslut locket ordentligt efter användning.

- ◆ Försiktighetsåtgärder vid användning

1. Kontrollera att det inte finns någon sekundär infektion i rotkanalen innan guttaperkan appliceras.
2. Använd samma storlek och tjocklek på guttaperkan som på den fil som använts.
3. Ta en röntgenbild efter applicering för att kontrollera att kanalen fylls ordentligt.

## Symboler



## Hållbarhet

4 år från tillverkningsdatum.

## Garanti och ansvarsbegränsning

DiaDent Group International ersätter produkter som bevisligen är defekta. DiaDent Group International tar inte ansvar för skada eller förlust, direkt eller indirekt, till följd av användning eller oförmåga att använda den beskrivna produkten. Det är användarens ansvar att före användning bedöma produktens lämplighet för den avsedda användningen. Användaren påtar sig alla risker och allt ansvar i samband därmed.

### European Representative

DiaDent Europe B.V.  
Antennestraat 70, 1322AS  
Almere, the Netherlands  
Tel : 31-36-549-8607 FAX : 31-36-536-7317

■ DiaDent Group International (Korea & International)  
16, Osongsangmyeong 4-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu  
Cheongju-si Chungcheong buk-do, 28161, Sydkorea  
Tel)82-43-266-2315 Fax)82-43-262-8658  
E-mail: diadent@diadent.co.kr

DiaDent Group International Inc. (Canada & USA)  
11-3871 North Fraser Way, Burnaby B.C.,  
Canada V5J 5G6  
Tel)1-604-451-8851 Fax)1-604-451-8865  
E-mail: diadent@diadent.com

DiaDent Europe B.V. (Europe)  
Antennestraat 70, 1322 AS  
Almere, Nederländerna  
Tel)31-36-549-8607 Fax)31-36-536-7317  
E-mail: diadent@diadent-europe.com