

Dandent® Danylen

Kanyl borttagare för injektionssprutor



MANUAL

Innehåll

1. Säkerhetsföreskrifter	3
1.1 Allmänt	3
1.2 Viktig information	3
1.3 Notis om säkerhetsföreskrifter	3
2. Introduktion	4
2.1 Kanyl borttagarens delar	4
3. Installation	4
4. Kontrollera modell	5
5. Användning	6
6. Byte av avfallsbehållaren	7
7. Skötselanvisning	7

1. Säkerhetsföreskrifter

1.1 Allmänt

Studera manualen noggrant och se till att den finns tillgänglig för alla som dagligen installerar, underhåller och använder utrustningen!

Denna manual beskriver en godkänd metod vid användning av apparaten. Följande säkerhetsinformation berör allt arbete med den.

1.2 Viktig information

Det är viktigt att ni:


- bevarar denna manual och andra tillämpliga dokument under kanyl borttagarens hela livslängd.
- skickar manualen vidare till andra ägare eller användare av utrustningen eftersom den utgör en integrerad del av kanyl borttagaren.
- för in eventuella tillägg eller förändringar i manualen som utförts eller godkänts av Danderyds Snickeri AB.

Danderyds Snickeri AB är inte skadeståndsrättsligt ansvariga för person- eller utrustningskador om föreskrifterna inte följs.

1.3 Notis om säkerhetsföreskrifter

Innan ni börjar använda denna utrustning var god läs igenom de tillämpliga delarna i manualen. Beakta noggrant alla varningar och OBS! som nämns i manualen. Allvarliga person- och maskinskador kan uppstå om ni underlåter att uppmärksamma denna information.

WARNING!

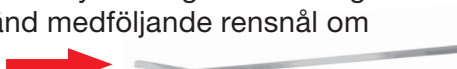Stoppa aldrig in fingrarna i kanyl borttagaren om något från kanylen har fastnat. Använd medföljande rensnål om kanylrester har fastnat. 

OBS!

Se till att kanylen går att skruva fast stadigt.

Vid inköp av ny modell av kanyl kontrollera att den fungerar i kanyl borttagaren Danylen.

2. Introduktion

Denna apparat är avsedd för avlägsnande av kanyler från injektionssprutor.



2.1 Kanylborttagarens delar

1. Handtag med öppning för sprutan
2. Apparatens mekaniska del
3. Avfallsbehållare för kanyler
4. Plugg för permanent tillslutning

3. Installation

Börja med att packa upp apparaten. Kontrollera att den inte blivit utsatt för transportskador.

Innan produkten lämnade fabriken genomgick den en grundlig kvalitets- och funktionskontroll. Skulle det vara något fel på produkten eller om transportskada uppstått, ska försäljningsstället omgående kontaktas.

4. Kontrollera modell



Var noga med att använda rätt modell av kanyl borttagare till den sprutmodell ni använder.

Vid felaktig användning fungerar inte kanyl borttagaren och gängorna på sprutan kan förstöras.

Handtagen på kanyl borttagaren är speciellt framtagna för att passa några av de vanligaste sprutmodellerna.

För att lätt kunna se vilken modell av kanyl borttagare som ska användas till respektive spruta är handtagen tillverkade i tre olika färger:



GUL
Alvesta
Art nr KBT200Y




BLÅ
Aspiject
Art nr KBT200B



RÖD
Sopira Carpule
Art nr KBT200R

5. Användning


Apparaten används till att ta bort kanyler från injektionssprutor på ett enkelt och säkert sätt.

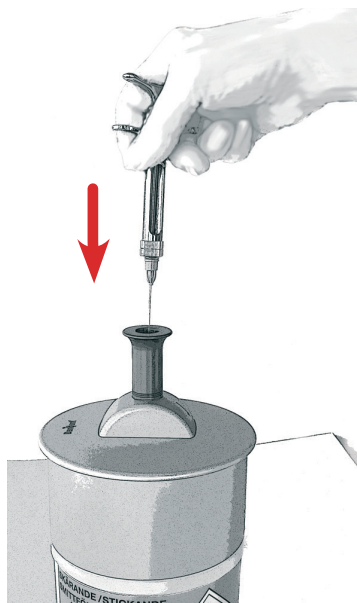

1. Stoppa ner sprutan med kanylen som ska avlägsnas i handtaget på ovasidan av apparaten.

OBS!
Skyddshylsan ska inte sitta på kanylen när den förs ned i apparaten.

Viktigt – drag till stopp!

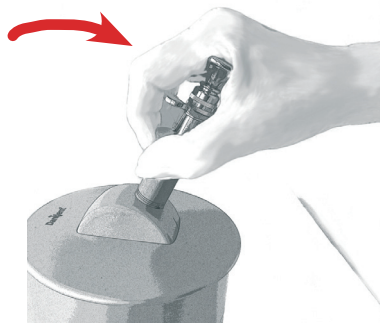

2. Dra ner handtaget i pilens riktning med ett snärtigt anslag tills det tar stopp.

Var sedan noga med att handtaget är i ursprungsläget innan den används igen.




3. Tag bort sprutan.

Betrakta sprutan som kontaminerad efter att den varit i apparaten.

6. Byte av avfallsbehållaren

Avfallsbehållaren får fyllas med kanyler till 2/3 av behållarens volym. Därefter ska den bytas ut mot en ny behållare.



1. Vrid och lyft av kanylborttagaren från avfallsbehållaren.
2. För permanent förslutning, tryck i den medsända pluggen i öppningen på ovansidan av behållaren.
3. Lämna avfallsbehållaren för deponi enligt era rutiner.
4. Montera en ny behållare.
5. Vrid så att markeringarna linjerar. 

Avfallsbehållaren från Danderyds Snickeri AB är godkänd för ADR-transport av smittförande avfall (ämnen), UN3291.

Burken är tillverkad i polypropen och försedd med absorberent.



7. Skötselanvisning

Sprita apparaten mellan varje patient.

Tillverkare:

 **Danderyds Snickereri AB**

Mallslingan 5, 187 66 Täby
Tel 08-544 44 160 • Fax 08-756 81 80
E-post info@dandent.se
www.dandent.se