



# S1 – RECIPROKERANDE ENFILSSYSTEM

Enkelt. Säkert. Komplett.



**Sendoline**<sup>®</sup>

# S1-VINKELSTYCKET

Det smarta S1-vinkelstycket har en unik integrerad växellåda som skapar den reciprokerande rörelsen direkt i vinkelstycket vilket ger en mjuk arbetsgång. Du ansluter vinkelstycket direkt till din tandläkarunit utan behov av en extern motor.



## Enkelt

S1-vinkelstycket kopplas direkt till unitens motor. Du kontrollerar vinkelstycket genom att ge full fart med fotkontrollen.

## Säkert

Den reciprokerande rörelsen ihop med filens elasticitet från nickeltitanlegeringen gör att risken för filfraktur minimeras.

## Driftsäkert

Ingen extern motor behövs och det finns inga batterier att ladda.

## Kostnadseffektiv hygienrutin

S1-vinkelstycket sköts och hanteras som dina övriga vinkelstycken. Du behöver ingen extra adapter i din smörj- och rengöringsmaskin.

## Det smarta extra

Du har möjlighet att enkelt ansluta en apexlokalisator till vinkelstycket med medföljande S1 Apex Clip.

# S5 Apex Locator

Använd en apexlokalisator för att fastställa rotkanalens längd. Du ansluter enkelt S1-vinkelstycket till en apexlokalisator med medföljande S1 Apex Clip.



# S1 PLUS-FILEN



Med S1-systemet har du möjlighet att rotbehandla med endast en maskinell fil.

S1 Plus-filen har Sendolines unika S-profil med dubbla avverkande egggar vilket är optimalt för S1-systemets reciprokerande rörelse.

Filens förlängda vridningar och avrundade spets gör den flexibel med mycket god kanalföljsamhet.

## Säker

Minimerad risk för filfraktur.

## Effektiv

Filens skär och förlängda vridningar gör den flexibel och effektiv.


## Följsam

Utformningen och designen gör den följsam i kanalen.

## Enkel hantering

Filarna levereras sterilförpackade i blister. Färdiga att använda.


## BEKRÄFTAD KANALFÖLJSAMHET OCH MATERIALHÅLLFASTHET

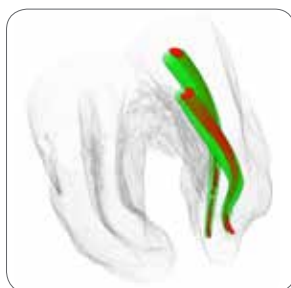

Micro-CT av S1 Plus Standard. Visar filens följsamhet (grön) i kanalen (röd).

Effects of three reciprocating single-file NiTi-systems on root canal geometry - A micro-CT analysis

Haupt F et al.  
Presented at 19<sup>th</sup> Biennial ESE Congress

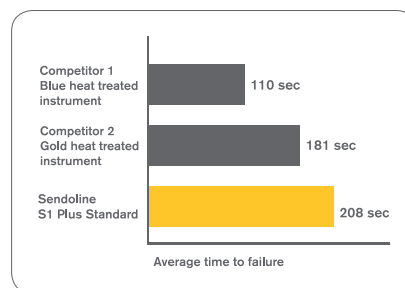

Motstånd mot materialutmattning.

Data on file.

## KOMPLETT, KOMPAKT SYSTEM

S1-systemet ger dig möjlighet att göra dina rotbehandlingar med endast en maskinell fil. I de flesta fall används S1 Plus Standard 25/06. Behandlar du smala, trånga kanaler väljer du istället S1 Plus Small 15/06 och för större

kanaler S1 Plus Large 40/04.

S1-systemet innehåller även sterilförpackade pappersspetsar och storleksanpassade gutta-perkaspetsar till filarna S1 Plus Standard och S1 Plus Large. S1 - ett komplett, kompakt system.



S1 Plus Standard 25/06



S1 Plus Small 15/06

Där S1 Plus Standard 25/06 inte når ned till arbetslängd.



S1 Plus Large 40/04

I större kanaler där en K-fil 20 lätt når ned till arbetslängd.

# MOVEMENT BY SWEDEN

The S1 System - reciprocating, smooth and flexible. Like a dance.



## PRODUKTÖVERSIKT

REF	Produkt	Antal
6542471	S1-E Vinkelstycke för elmotor (40,000 rpm)	Kit
6574136	S1-A Vinkelstycke för luftmotor (20,000 rpm)	Kit
OP0007	S1-E Plus Start Up Set 2.0*	Set
OP0008	S1-A Plus Start Up Set 2.0*	Set
6583566	S1 Apex Clip dia. 2.0 mm	1 st/fp
S1P01BS	S1 Plus Treatment Pack	6 st/fp
S1P252506BS	S1 Plus Standard 25/06 - 25 mm	6 st/fp
S1P312506BS	S1 Plus Standard 25/06 - 31 mm	6 st/fp
S1P251506BS	S1 Plus Small 15/06 - 25 mm	6 st/fp
S1P311506BS	S1 Plus Small 15/06 - 31 mm	6 st/fp
S1P254004BS	S1 Plus Large 40/04 - 25 mm	6 st/fp
S1P314004BS	S1 Plus Large 40/04 - 31 mm	6 st/fp
3521010BS	K-File 10 STERILE - 21 mm	30 st/fp
3525010BS	K-File 10 STERILE - 25 mm	30 st/fp
3521015BS	K-File 15 STERILE - 21 mm	30 st/fp
3525015BS	K-File 15 STERILE - 25 mm	30 st/fp
259-705	S1 Paper Points Standard	120 st/fp
258-708	S1 Paper Points Large	120 st/fp
159-605	S1 Gutta Percha Standard	60 st/fp
158-608	S1 Gutta Percha Large	60 st/fp
385S15001	S5 Apex Locator	Kit

\*För mer information kontakta din lokala återförsäljare eller Sendoline.

## Sendoline®

Box 7036, 187 11 Täby | Måttbandsvägen 12B, 187 66 Täby | Sverige

 [contact@sendoline.com](mailto:contact@sendoline.com)  [www.sendoline.com](http://www.sendoline.com)

Allt innehåll i denna broschyr inklusive layout och bilder är skyddade av upphovsrätt.

Sendoline, S1, S5, S5 Rotary Files, S-Files/S-fil, inklusive S-symbolen och NiTi-S är varumärken och/eller bildmärken som tillhör Sendoline.

© 2019 Sendoline AB. Med ensamrätt.