

Bruksanvisning - Guttasolv

Guttasolv är avsedd för att mjuka upp masterpoint vid initial endodonti samt vid revision av endodontiskt behandlade tänder.

Arbetsgång

1. Rengör, på mekanisk väg, pulpakammaren och kanalmyningarna.
2. Placera en eller några droppar på guttaperkan.
3. Använda en sond eller mekanisk rymmare, typ Gates, för att avlägsna uppmjukad guttaperka
4. Placera ytterligare någon droppe Guttasolv i rotkanalen och arbeta successivt mot apex.

Observera att tanden / rotkanalen efter behandling med Guttasolv ska vara ordentligt rengjord med natriumhypoklorit, exempelvis Parcan 3 %, före applicering av ny sealer och guttaperka.

Försiktighetsmått

Guttasolv innehåller eukalyptusolja. Behandling ska ske med skyddshandskar och applicerad kofferdam.

Lagring

Guttasolv är brandfarlig. Produkten ska lagras mörkt och svalt, gärna i kylskåp.