

Ny patentsökt produkt



DryDent, för bekväm torrläggning av underkäken

*Lägg DryDent direkt på körtelmynningarna under tungan
så når saliven aldrig munhålan.*



caresumables


Använd mjuka, sköna DryDent vid alla tillfällen då du vill skydda och hålla torrt i underkäken.

- Saliven tas om hand direkt vid källan.
- Cementeringar och fyllningar blir säkrare när salivstänk elimineras.
- Patientens sväljreflexer och kväljningskänslor minskar.
- Ersätter salivsugen på personer med exostoser och tunna slemhinnor.
- Lämplig vid avtryck.
- Lätt att applicera, ingen fram- och baksida.
- Mjuk, flexibel form gör att du också kan använda DryDent vid parotis.
- Fastnar inte på slemhinnorna.
- Under våra tester har hittills alla patienter upplevt DryDent som bekväm och lugnande.




Användarinstruktioner


Prova dig fram till en metod som passar dig.

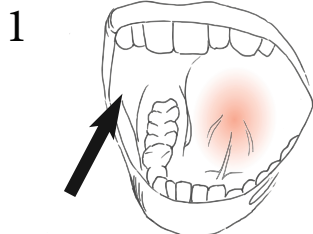

Be patienten lyfta tungan uppåt bakåt

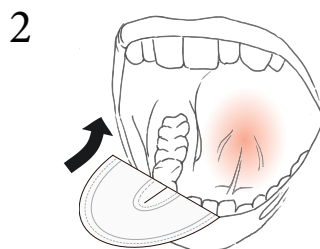

Placera DryDent genom att applicera den på baksidan av den lyfta tungan med två fingrar eller pincett

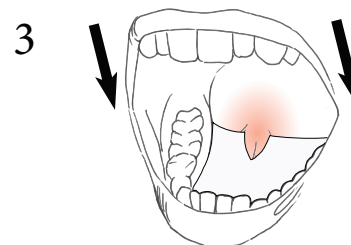

Be patienten slappna av och DryDent kilas fast under tungan.


DryDent Medium. Storlek: 30x50x2 mm
Uppsvälld storlek: 30x50x10mm
5 - 10 minuters uppsugningsförmåga beroende på grad av salivsekretion
Enkel transportvänlig och barriärtät förpackning

Kontakta Kristina Frisk
kristina.frisk@caresumables.com eller tel: +46(0)722-092080



DryDent är utvecklad i Sverige av Caresumables AB i samarbete med Sahlgrenska Science Park och ett flertal privatkliniker och folktandvårdskliniker i Västra Götaland. Besök vår hemsida för mer information
www.caresumables.com

caresumables



“Denna vill jag promovera! Den fastnar inte som andra absorbenter kan göra”

“DryDent har gjort vår dag! Vi skulle fylla två rotkanaler och det var väldigt lite kvar av tanden så klammern satt löst. Vi lade en DryDent under kofferdam istället för sugen för att hålla undan saliv. Patienten låg helt stilla utan problem med sväljreflexer”

“Den här var bra, den vill jag använda. I vanliga fall ligger inte sugen stilla men med en DryDent under så låg den still under både prepp och avtryck”

“Jag lade en DryDent under tungan och en bomullsrulle vid sidan av tungan och sedan låg patienten helt stilla under hela fyllningen”

“Med den här kan man glömma tungan och munbotten”

Kommentarer från patienter och professionella inom privattandvård och folktandvård i Västra Götalandsregionen

“I vanliga fall har jag problem med att jag får kväljningar. Med den här under tungan blev jag lugn. Jag kände inte behovet av att svälja hela tiden”

“Den här var väldigt skön, jag kände den inte alls och så blev det så tyst och skönt. Jag brukar få ont av salivsugen eftersom jag har knölar i munnen”

“Patienten upplevde DryDent som mycket bättre jämfört med kompressen jag brukar lägga under tungan vid blekningar”

“Det var väldigt käckt med den här, det blev mycket ljusare och lättare att se”

“Faktum är att jag får mer plats än med sugen”

Köp enkelt via faktura på vår webshop

www.drydent.se



caresumables

Caresumables AB, Box 11027, 404 21 Göteborg