

Peroxy Ag+

Desinfektionsmedel för vattenledningar i dentala enheter

Produkt för professionellt bruk

Bruksanvisning:

Desinfektion: i enlighet med anvisningarna för enheten, håll den rena produkten (Väteperoxid 3%) i en specifik behållare för desinfektionsmedel i enheten. Bakteriestatiskt skydd för fristående vattenförsörjning: späd ut 20 mL produkt per liter vatten (destillerat) i matningsbehållaren, du får en 600 ppm väteperoxidlösning.

Sammansättning:

Väteperoxid 3%, silverjoner 0,001% såsom Ag+, Stabilisatorer, vatten i tillräcklig mängd
Effekt i enhetens vattenledningar: 3% väteperoxid har visats ha mikrobaktericid, baktericid och fungicid effekt efter 10 minuters kontakt. En 600 ppm lösning har visats inhibera mikrobiell tillväxt i ledningarna.

Varningar:

Använd i enlighet med den dentala enhetens bruksanvisningar. P262 Undvik kontakt med ögon, hud eller kläder P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: skölj noga under flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser om det är lätt att göra det. Fortsätt att skölja.