

# HEMOSTASYL

## 1 – PRESENTATION

- Förpackningens innehåll: Två sprutor med 2 g Hemostasyl och 40 böjda applikationskanyler för engångsbruk.
- Påfyllningar: Ask med två sprutor med 2 g – Ask med 40 böjda applikationskanyler för engångsbruk.

## 2 – EGENSKAPER

Hemostasyl är en originalpasta som är avsedd att fungera som hemostatiskt förband genom mekanisk verkan.

Hemostasyls huvudsakliga egenskaper: • tixotropiska egenskaper • god vidhäftning vid tandköttets slemhinnor, utan tryck • förekomst av aluminiumklorid som förstärker den mekaniska hemostatiska verkan • appliceras direkt i munnen med hjälp av böjda kanyler för engångsbruk • lätt att identifiera tack vare sin färg • lätt att ta bort med mjuk vattenstråle utan ytterligare blödning • smärtfri metod om Hemostasyl används på friskt parodontium • kontakttid: två minuter.

## 3 – SAMMANSÄTTNING

- Aluminiumklorid. • Hjälppännen.

## 4 – INDIKATION

Hemostasyl är avsett att användas i alla fall av begränsad blödning som uppstår vid vanligt förekommande odontostomatologisk behandling (avlägsnande av tandsten m.m.). Användning av denna produkt medför ingen fara för barn eller gravida eller ammande kvinnor.

## 5 – FÖRESKRIFTER FÖR ANVÄNDNING

- Kanylerna är för engångsbruk. SLÄNG använda kanyler efter användning. • Hemostasyl indikeras inter vid kraftig blödning. Använd i sådana fall i stället ETIK Kollagen eller Gingistat. • Använd inte på ställen där produkten riskerar att inte elimineras, som t.ex. i parodontala fickor. • Kontrollera noga att all Hemostasyl tagits bort. • Kemiska rester av hemostatiska ämnen kan begränsa fästmedels förmåga att fästa vid dentin: skölj väl med vatten i minst 10 sekunder före limning. • Skölj i händelse av ögonkontakt i rikligt med vatten. • Får inte sväljas. • Förvaras oåtkomligt för barn.

## 6 – KONTRAIKATIONER

- Hål efter extraktion. • Rotkanalkirurgi. • Känd allergi mot aluminiumklorid.

## 7 – BRUKSANVISNING

- Preparering: Ta av sprutans kork. Skruva i dess ände på den böjda kanylen för engångsbruk.
- Applicering: massan appliceras direkt på tandköttet vid blödningen så att denna täcks helt, utan att trycka med kanylen på tandköttet. Låt verka i två minuter.
- Borttagning: Ta bort Hemostasyl med hjälp av en mjuk vattenstråle med samtidig uppsugning. Kontrollera att ingen HEMOSTASYL finns kvar på tandköttet.

## 8 – DESINFICERING AV SPRUTAN UTVÄNDIGT

Efter att kanylen för engångsbruk har tagits av och kastats kan sprutan rengöras och saneras utvändigt med hjälp av desinficerande rengöringslappar (utan aldehyd), varvid tillverkarens förutsättningar för användning ska respekteras.

## 9 – FÖRVARING

- Efter användning ska använd kanyl tas av och kastas. Sätt på korken ordentligt på sprutan igen. • Förvara inte kanylerna så att de har kontakt med sprutorna. Förvara nya kanyler i originalemballage, utan kontakt med sprutorna (risk för korrosion). • Använd inte efter det sista förbrukningsdatum som står på ytterförpackningen. • Förvaras vid temperatur < 25°C.

## 10 – UNDANSKAFFANDE

- Återvinns eller undanskaffas enligt gällande lagstiftning, bestämmelser och förordningar, helst av godkänd entreprenör eller företag. • Får inte undanskaffas i naturen.

Produkt för yrkesmässigt bruk inom tandvård.

Oktober 2011