

Aquatabs

Vattenreningstabletter / 500 st

I vattenreningssammanhang är Aquatabs en välkänd produkt rekommenderad av bl.a. FN:s utvecklingsprogram, WHO och Röda korset.



Kontinuerlig användning (användning efter att flaskan monterats och grundrengöring utförts)

1. Tillsätt Aquatabs vid varje tillfälle som flaskan fylls. 1 tablett för 1 liter vatten.
2. Varje morgon: "Byt vatten" i unitens slangsystem genom att spola igenom varje slang/tappställe minst ½ min.

Tips! Förbered en extra flaska så spar du tid när du ska byta.

Särskilda åtgärder vid längre uppehåll (storhelger, semester, etc.)

Före uppehållet:

1. Fyll ca ½ liter vatten i flaskan, och tillsätt 3 Aquatabs.
2. Spola ur systemet som vid vanlig morgonrutin och lämna uniten på detta sätt under uppehållet (lämna flaskan monterad).

Efter uppehållet:

1. Byt till vatten med normaldoseringen av Aquatabs (1 tabl/liter).
2. Spola ur som vid vanlig morgonrutin och fortsätt sedan som vanligt.

Socialstyrelsen rekommenderar att bakteriologisk analys av vattnet i dentala unitar görs minst en gång per år. Bakteriologiska analyser görs bland annat vid Tandläkarhögskolan i Umeå, Kliniska laboratoriet/oral mikrobiologi.

Tel 090-785 61 67 / oralmikrobiologi@vll.se

 **TS DENTAL**

0935-131 11, info@tsdental.se, www.tsdental.se