

SAFETYWAND®
och
SAFETYWAND® STA SINGLE
TOOTH ANESTHESIA®

HANDENHET



MILESTONE
SCIENTIFIC

STA-5040A-SAF
STA-5040 SAF-2725
STA-5040 SAF-305
STA-5040 SAF-301
WA-2040A SAF
WA-2040 SAF-2725
STA-2040 SAF-305
STA-2040 SAF-301

FÖRSIKTIGHET: Enligt amerikansk lag får denna produkt endast säljas av eller på uppdrag av tandläkare och läkare.

MEDICINSK ANVÄNDNING:

Denna produkt är avsedd att användas endast i tandläkares subkutana eller intramuskulära injektioner av lokalanestetika. Den bör inte användas för intravaskulära (IV) eller andra administreringsvägar. Denna produkt bör endast användas av personal som är förtrogen med, och följer tillämplig märkning om, tandläkares användning av lokalanestetika.

MILESTONES KUNDTJÄNST

Om du har frågor eller behöver hjälp ber vi dig omgående ringa oss, helt kostnadsfritt på:

USA Milestone Scientific
220 S. Orange Avenue
Livingston, NJ 07039
1-800-862-1125



PDS Ltd.
Nottingham, UK
NG1 1GF
+44 (0) 115-912-4277



GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

SAFETYWand®

Produktbeskrivning

1) Handenheterna SafetyWand® och SafetyWand® STA Single Tooth Anesthesia® (fig. 1) har konstruerats med säkerhetsutformat skydd mot stickande/skärande delar för att bidra till att förebygga nålstick.

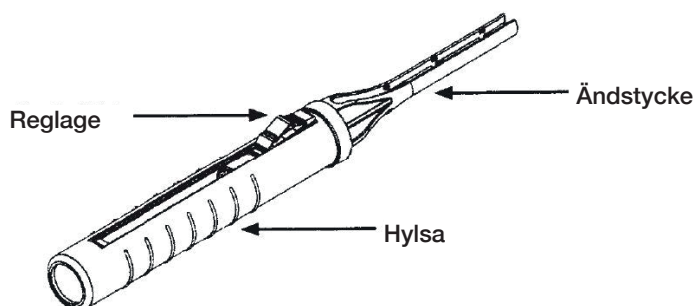


Fig. 1

ANVÄNDNING:

För att använda reglaget i SafetyWand® och SafetyWand® STA Single Tooth Anesthesia® behövs det bara en försiktig och gradvis rörelse för att gripa tag i eller släppa reglaget, med vilket nålen skjuts fram och dras in. Bekanta dig med denna användning genom att öva med produkten före klinisk användning.

Skjuta fram:

Tryck ned REGLAGETS bakre del och skjut det framåt till det helt framskjutna läget. (Se illustration)

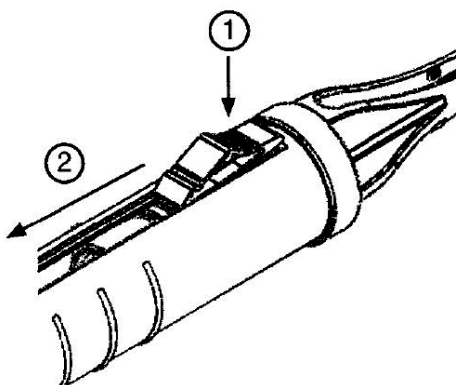
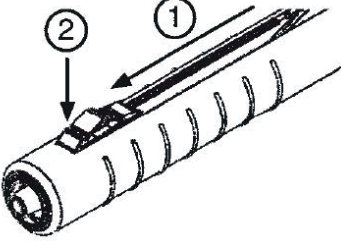
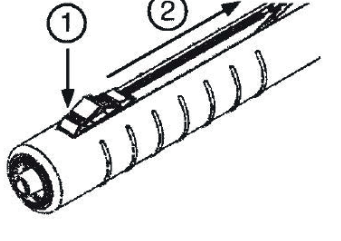


Fig. 2

GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Låsa: I det helt framskjutna läget, tryck ned REGLAGETS främre del för att låsa.	Låsa upp: Tryck ned REGLAGETS bakre del och släpp.
 <p>Fig. 3</p>	 <p>Fig. 4</p>

Förbereda nållös SAFETYWand:

1. Slå på drivenheten.
2. Ta ut den sterila SafetyWand® och SafetyWand® STA Single Tooth Anesthesia®-handenheten ur förpackningen. Upprätthåll sterilitet.
3. Montera nålen:
 - a) Håll SafetyWand® och SafetyWand® STA Single Tooth Anesthesia® i en hand.
 - b) Montera en standard luerlåsnål genom att trycka ned reglagets bakre del och skjuta det framåt. Lås i det framskjutna läget genom att skjuta reglaget framåt och trycka ned reglagets främre del.
 - c) Samtidigt som du håller ordentligt i SafetyWand® och SafetyWand® STA Single Tooth Anesthesia®, placera änden av standard luerlåsnålen i den öppna änden av SafetyWand® och vrid tills den sitter ordentligt.
 - d) Placera handenheten vid sidan av drivenheten när den inte används. När den har fästs, dra in nålen genom att trycka ned reglagets bakre del och dra handenheten rakt ut ur skyddet. Vrid inte. (Locket förblir i uttaget på sidan av enheten.) När den inte används, sätt tillbaka den indragna handenheten i skyddet på drivenhetens hållare.

ANMÄRKNING: SafetyWand® och SafetyWand® STA Single Tooth Anesthesia® är också tillgängliga med ett urval av nålar som är förmonterade och sammanfogade vid handenheten. Handenheten med 1,27 cm 30 G-nålen har optimerats för STA-intraligamentinjektionerna. Kontakta din återförsäljare avseende tillgänglighet.

GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

4. Ladda bedövningsmedel i SafetyWand® och SafetyWand® STA Single Tooth Anesthesia® och montera kassetthållaren på drivenheten genom att vrida hållaren ca 1/4 varv moturs i drivenheten. Töm luften från slang och nål. Handenheten är nu fylld och redo för användning.

Anvisningar för användning av SAFETYWand®:

1. Ta bort handenheten (med monterad nål) från skyddet på sidan av drivenheten. Skjut fram nålen genom att trycka ned reglagets bakre del, försiktigt skjuta fram den hela vägen (fig. 5) och trycka ned reglagets främre del för att låsa fast i det framskjutna läget (fig. 6). Reglaget "självlåses" i det framskjutna läget. Genomför injektionen.

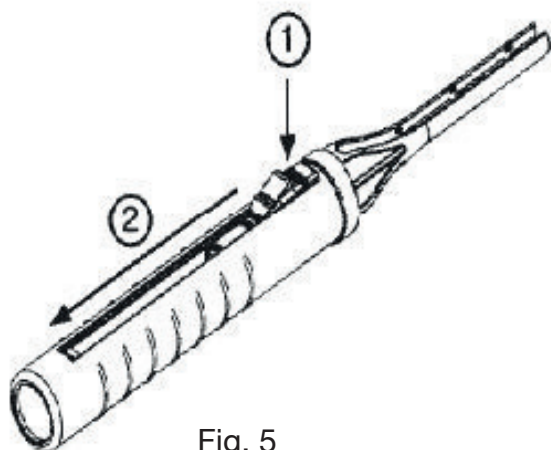


Fig. 5

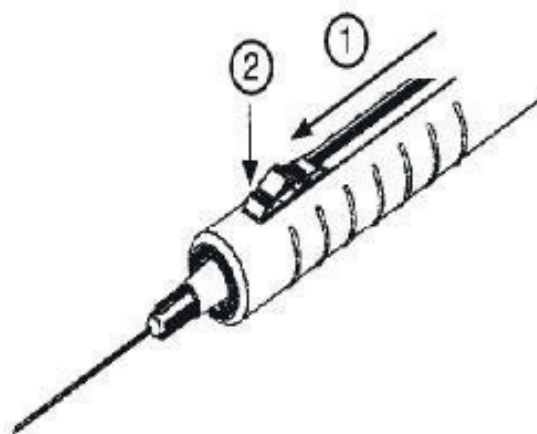


Fig. 6

2. Dra in nålen med en hand genom att trycka ned reglagets bakre del med ditt finger eller din tumme. Detta kommer automatiskt att dra in nålen i säkerhetsläget. Du kommer att höra och se reglaget och nålen "låsa" fast i det indragna säkerhetsläget (fig. 7, 8).

GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Dra in:

Tryck ned REGLAGETS bakre del för att släppa

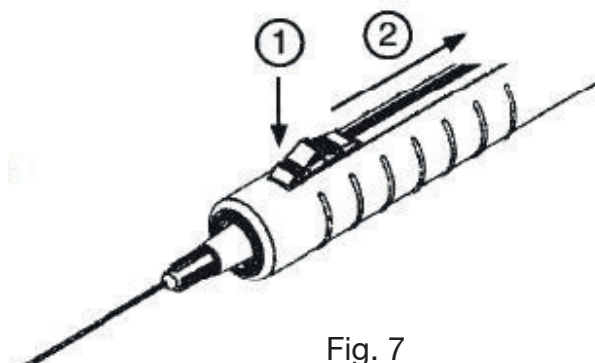


Fig. 7

Autom. indragning:

Nålen kommer automatiskt att dras in när den släpps från det framskjutna läget.

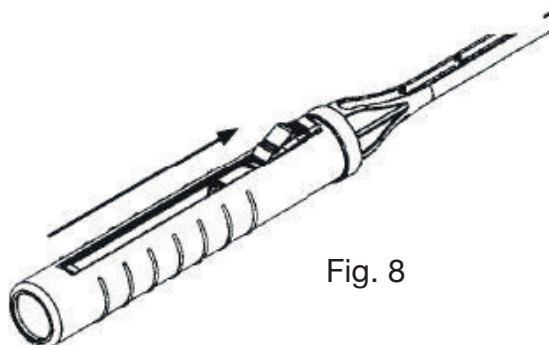


Fig. 8

3. Placera handenheten vid sidan av drivenheten när den inte används. Medan den befinner sig i det indragna läget, och med nålskyddet som stöd, skjut in handenheten i skyddet på sidan av drivenheten.

Kassering:

1. Efter den sista injektionen, dra ut nålen ur vävnaden och dra in den till det bakre läget.
2. Håll stadigt ned reglagets framände med din tumnagel och tryck in den i hylsan
3. Tryck tillräckligt hårt så att reglagets främre del "bryter genom" och snäpper fast i hylsan. Detta förhindrar att handenheten skjuts fram.

GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

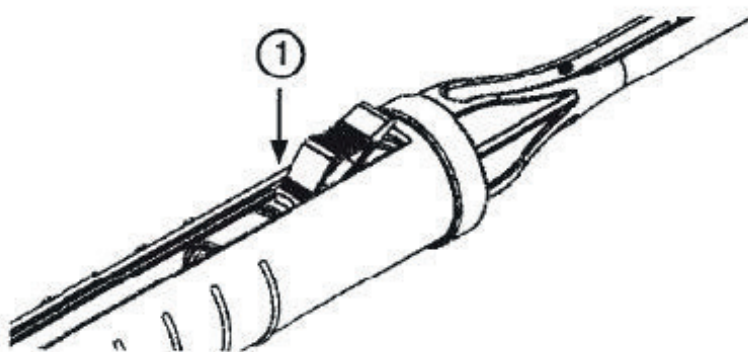


Fig. 9

4. Kassera direkt på ett godkänt sätt, t.ex. i en behållare för stickande/skärande avfall.

FÖRSIKTIGHET: Använd inte nålar som är längre än 3,17 cm med SAFETYWand®.

FÖRSIKTIGHET: Upprätthåll sterila villkor.

We'll back
you up

