



DAX Ytdesinfektion Plus

DAX Ytdesinfektion Plus är avsedd för desinfektion av släta ytor, t.ex. undersökningsbritsar, bänkar, bord etc. DAX Ytdesinfektion Plus är effektiv mot bakterier, svampar och olika typer av virus som t.ex. Hepatit B, C och HIV.

Exempel på användningsområden är inom hälso-, sjuk- och tandvård samt hos veterinärkliniker. Produkten är även lämplig för användning inom livsmedelshantering och barnomsorg.



DAX Ytdesinfektion Plus

Hygien

En god hygien och rutinmässig användning av desinfektionsmedel är mycket viktigt för att förebygga smittspridning.

Gör så här

- Dränk in en torkduk med outspätt medel.
- Torka ytan upprepade gånger tills ytan är ren.
- Låt lufttorka.

Produktfakta

DAX Ytdesinfektion Plus är en färdig brukslösning som består av isopropylalkohol. Alkoholstyrkan är 45 volymprocent. DAX Ytdesinfektion Plus verkar snabbt och avdunstar utan att lämna spår efter sig på den behand-

lade ytan. Tillsatsen av tensid som smutslösare gör att ytan inte behöver förbehandlas. Produkten har även en god upplösande effekt på t.ex. spill av blod.

DAX Ytdesinfektion Plus är CE-märkt och uppfyller de europeiska normerna för desinfektionsmedel.

Lagring och hållbarhet

Förvaras i rumstemperatur i väl försluten originalförpackning. Hållbarhet i obruten förpackning, se datummärkning.

Miljö

Samtliga förpackningar är återvinningsbara och avger inte några skadliga ämnen vid ev. förbränning.

Förpackningar:

1000 ml flaska

5000 ml dunk



DAX Hudvård, Hudtvätt och Desinfektion är en serie produkter med väl dokumenterad funktion baserad på lång erfarenhet. DAX har utvecklats med särskild dermatologisk hänsyn och genomgår noggrann kvalitetskontroll.

Opus Health Care AB

Box 50208, SE-202 12 Malmö, Visiting address: Murmansgatan 120

Tel: +46 (0) 40 680 15 40, Fax: +46 (0) 40 680 15 49, E-mail: info@opushc.se, www.opushc.se

Brands: DAX, Neutral, zendum

A  Company

