

3M ESPE

Adhesiven du kan lita på finns nu
i två populära förpackningar



Adhesivsystem från 3M ESPE

Säkert resultat med beprövad adhesiv.

Den unika engångsapplicatorn från 3M ESPE:

- Snabbt och enkelt – Kläm ihop och applicera.
- Hygieniskt arbetssätt.

Nanoteknologins fördelar för dig

Adper™ Scotchbond™ 1 enkomponent adhesiv är en etanol/vatten-baserad, ljushärdande totaletsadhesiv som vunnit ryktbarhet för utomordentlig klinisk funktion, in vitro och in vivo. I Adper™ Scotchbond™ 1 XT är egenskaperna ytterligare förbättrade genom en liten tillsats (10 viktprocent) av samma nanometerstora fillerpartiklar som (först användes) i Filtek™ Supreme.

Indikationerna är samma som för Adper Scotchbond 1, alltså alla klasser av direkta och indirekta restaurationer och på samma sätt skall kaviteten etsas med fosforsyra innan Adper Scotchbond 1 XT appliceras.

- o Tack vare nanoteknologin fås en högre bindningsstyrka till dentin och emalj jämfört med Adper Scotchbond 1.
- o Fillerinnehållet ger en jämnare adhesivfilm.
- o Bättre bindningsstyrka både vid direkta och indirekta indikationer jämfört med Adper Scotchbond 1.
- o Nanofillerna sjunker inte till botten så flaskan behöver inte skakas innan användning.

Två praktiska förpackningar - flaska eller engångsapplicator

Adper Scotchbond 1 XT ska förenkla och förbättra för dig i ditt arbete. Därför kan du nu välja mellan adhesiv i flaska eller på engångsapplicator beroende på vad som passar just ditt arbetssätt bäst.

Adhesiv i flaska




- Flaskan innehåller både primer och resin.
- Vipplock gör den enkel att öppna och applicera med en hand.
- Den orangefärgade genomskinliga flaskan gör att du lätt ser hur mycket som finns kvar.
- Mindre spill och lättare dosering tack vare små precisa droppar.

Engångsapplicator




- Snabbare procedur från början till slut. Inget att mäta upp och inget att rengöra.
- Den unika designen innehåller allt, från adhesiv till applicatorn.
- Engångssystemet underlättar hygien.
- Engångsapplicatorn innehåller både primer och resin.

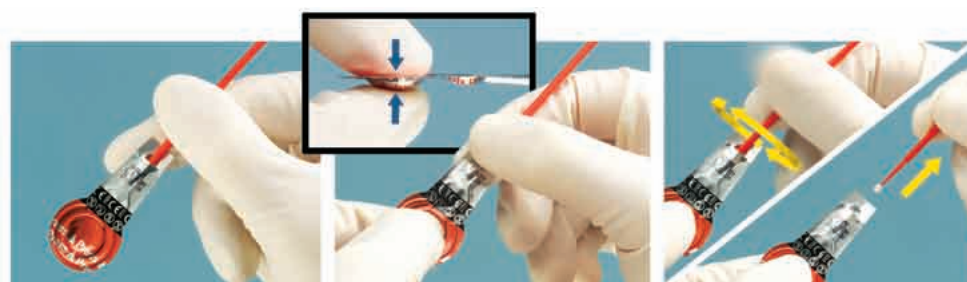

Utmärkt för alla ljushärdande direkta och indirekta indikationer.


Som originalet Adper™ Scotchbond™ 1 adhesiv, fungerar Adper™ Scotchbond™ 1 XT totaletsadhesiv utomordentligt vid:

- Direkta ljushärdande komposit/kompomer-fyllningar
- Desensibilisering av rotytor / känsliga tandhalsar
- Reparation av porslin och komposit
- Porslinsfasader (tillsammans med RelyX™ Veneer Cement)
- Kronor/broar, inlay/onlay, bondning av amalgam (tillsammans med RelyX™ ARC Cement) 
- Amalgam bondning.


Adper Scotchbond 1 XT ger högre tillförlitlighet.

- Överlägsen bindningsstyrka ger säkert resultat.
- Nanofillerna är stabila och sjunker inte till botten – flaskan behöver inte skakas.


Bruksanvisning (direkt ljushärdande fyllning)

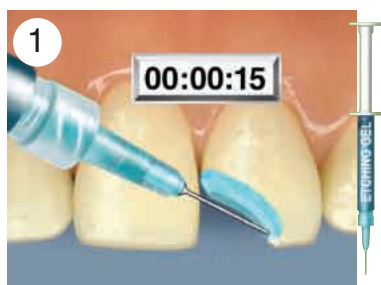


Applicera Scotchbond™ ets på emalj och dentin.
Vänta 15 sekunder.

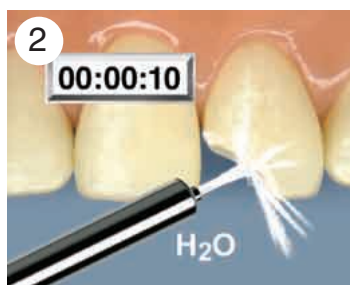

Spola 10 sekunder.

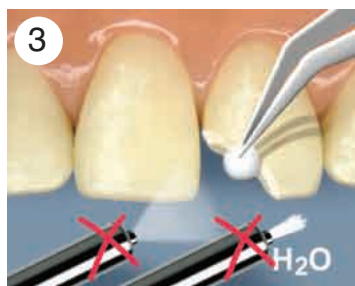

Torka bort överskottsvatten med bomullspellet eller skumplastpellets och lämna tanden fuktig. Ytan skall vara blank utan vattendroppar.

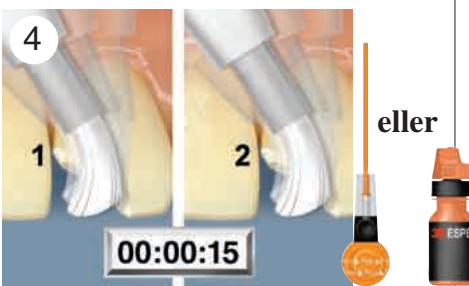

Lägg direkt efter torkningen på 2-3 skikt adhesiv på etsad emalj och dentin i 15 sekunder under lätt agitation med mättad applikator.



Blästra lätt i fem sekunder för att få bort lösningsmedlet.



Ljushärda i 10 sekunder.

Produktinformation

Adper™ Scotchbond™ 1 XT engångsapplikatorer

**51010 Adper Scotchbond 1 XT
Engångsapplikatorer (40)**
Innehåll:
40 Adper Scotchbond 1 XT engångsapplikatorer
1 x 3 ml Etsgel¹.
Intraorala spetsar till fosforsyra¹, bruksanvisning

**51011 Adper Scotchbond 1 XT
Engångsapplikatorer (100)**
Innehåll:
100 Adper Scotchbond 1 XT engångsapplikatorer
1 x 3 ml Etsgel¹.
Intraorala spetsar till fosforsyra¹, bruksanvisning

Varje engångsapplikator innehåller 0,12 g.



Adper™ Scotchbond™ 1 XT adhesiv i flaska

**4241 Adper Scotchbond 1 XT
Introkit flaska**
Innehåll:
1 x 6 g Adper Scotchbond 1 XT adhesiv¹
2 x 3 ml Etsgel¹
Blandningskoppar¹
Appliceringspenslar¹
Penselskaft¹
Bruksanvisning

**4242 Adper Scotchbond 1 XT
Refill**
1 x 6 g Adper Scotchbond 1 XT adhesiv¹
Bruksanvisning

¹Finns även separat



**3M Svenska AB
3M ESPE Dentalprodukter**

Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollentuna
Tel 08-92 21 00
Fax 08-92 22 89
www.3mespe.com/se

Tryckt i Danmark
© 3M 2004

3M, ESPE, Adper, Scotchbond och
RelyX är varumärken för 3M eller
3M ESPE AG